

Складной переносной массажный стол трех секционный



NIRVANA




CE

Установка стола

Положите стол на бок, откройте застежку, частично откройте стол, вытащите все аксессуары (рис. 1).

Рис. 1

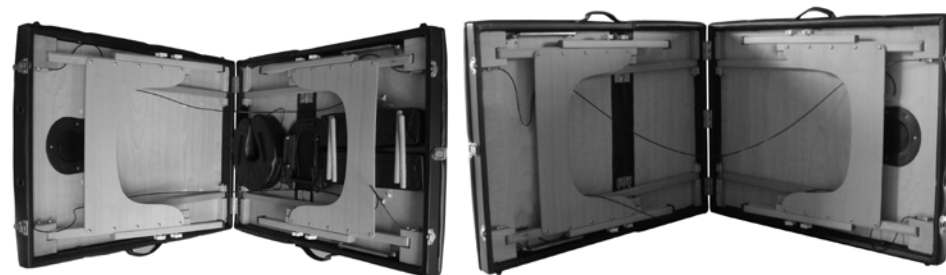

Стоя за столом, возьмитесь за обе ручки стола и осторожно поверните его наружу, чтобы полностью открыть стол, ножки должны выпрямиться автоматически (рис. 2).

Рис. 2



Подголовник

Подголовник состоит из основания подголовника полукруглой формы и подушки-подголовника. Можно с легкостью отрегулировать угол наклона и высоту, отрегулировав ручку на основании подголовника (рис. 3).

Рис. 3



Подлокотники

Эти съемные мягкие подлокотники добавляют столу ширины. Они устанавливаются в специальные отверстия по бокам стола. Они обеспечивают удобную поддержку руки, особенно для крупных пациентов (рис.4).

Рис.4



Регулировка спинки

Откройте застёжку регулировки спинки. Можно с легкостью изменить угол наклона спинки. Надавите на спинку, чтобы убедиться, что она зафиксирована перед использованием. Чтобы сложить спинку, поднимите ее до максимального угла, затем опустите до горизонтального положения (рис. 5).

Рис. 5

